

FICHE TECHNIQUE

Melectis®

Lot 1601001 et lot 1601002

30g MPM-001 – 5g MPM-002

Description : Melectis® – tube de 30g ou 5g est un gel cicatrisant développé pour la cicatrisation des plaies. C'est un dispositif médical de classe IIb stérile, stérilisé par rayonnement pour préserver ses propriétés. Il bénéficie d'un marquage CE0459.

Propriétés : Melectis® est une composition pro-cicatrisante brevetée conçue à partir d'une sélection de miels monofloraux.

Indications : Melectis® est une composition à base de miels sélectionnés pour le traitement des plaies. Il est utilisé sur :

- les plaies opératoires désunies (cicatrisation dirigée)
- les plaies aiguës et chroniques
- les plaies issues de radiothérapie
- les brûlures du 1^{er} et 2nd degré
- les ulcères et les escarres

Son utilisation est recommandée sur les plaies aiguës et chroniques pour favoriser et relancer le processus de cicatrisation.

Composition : 100% miel – Assemblage de miels monofloraux (miellat, sarrasin, thym)

Mode d'emploi : Pour assurer une bonne cicatrisation :

1. Rincer la plaie avec du sérum physiologique. Sécher doucement le bord de la plaie.
2. Recouvrir l'intégralité de la surface de la plaie ou le pansement secondaire (un tulle gras, de préférence) d'une fine pellicule de MELECTIS®. Il est inutile de remplir les plaies cavitaires.
3. Recouvrir de compresses et d'un pansement occlusif durant les premières applications pour les plaies très exsudatives.

Le MELECTIS® peut s'appliquer en fin de détersion sur une plaie contenant jusqu'à 20% de fibrine, pour relancer le processus de bourgeonnement. Dans certains cas, l'application sur la plaie peut provoquer une irritation, une sensation de picotement ou de brûlure. Ces sensations peuvent être temporaires ou permanentes. Si cela se produit, il est conseillé de renouveler le pansement en utilisant une compresse humide. En cas de persistance des symptômes, une autre solution de traitement devra être envisagée.

La fréquence de renouvellement du pansement doit être adaptée à chaque plaie par le patient ou par l'équipe médicale en charge du patient. A titre indicatif, en cas de plaie exsudative, contaminée, fibrineuse... (en phase de détersion, par exemple), il est conseillé de refaire le pansement une à deux fois par jour. En cas de plaie propre (en phase de bourgeonnement, par exemple), il est conseillé de refaire le pansement toutes les 48/72 heures.

Caractéristiques :

Nom :	Melectis® 30g	Melectis® 5g
Quantité contenue :	30g	5g
Dimensions :	95 x 28 x 28 mm	13,5 x 55 mm
Microbiologie :	Stérile	Stérile
Code ACL :	9984802	4129676

Stockage :	Température ambiante	Température ambiante
DLUO :	3 ans après production	3 ans après production
PAO :	90 jours (30g)	30 jours (5g)
Conditionnement :	Tube en PEHD, étui en carton imprimé	

01/08/2016

Approved by : **Quality assurance**