

NDP Air Total+ Green CE	Marquage CE ON 0476	Version 07 Date de la dernière mise à jour:30.01.18 PAGE 1 DE 4
------------------------------------	------------------------	--

Vesimin S.L.

C/Lluçà, 28 5º
08028 Barcelona (Spain)
Telf: +34 934.095.301
Fax: +34 933.396.628

Description

- NDP Air Total+ Green CE est un produit pour la désinfection de surfaces de dispositifs médicaux par voie aérienne, pour usage dans le domaine médical et des collectivités.
- Décharge totale par sa valve « one-shot » qui permet de nébuliser le contenu en une seule application.
- Elaboré à partir d'une formulation synergique (NDP) d'ingrédients actifs, avec des ammoniums quaternaires de dernière génération combinés avec des agents adjuvants et des extraits actifs d'huiles essentielles.
- NDP Air Total +Green CE ne contient pas dans sa formulation de gaz inflammable ni d'ingrédients toxiques, ce qui permet son utilisation dans des endroits où d'autres produits désinfectants ne peuvent pas être utilisés.
- Large spectre biocide et action rapide sur les bactéries, mycobactéries, champignons et virus.
- Elimine les mauvaises odeurs provoquées par la décomposition bactérienne.
- La nébulisation permet l'accès de la formule désinfectante aux zones difficilement accessibles par d'autres moyens, ce qui rend NDP Air Total + Green CE, idéal dans les pratiques de désinfection terminale.
- Le produit est en accord avec les spécifications AMS 1452 (SAE AMS 1452; Disinfectant Aircraft, General Purpose) pour l'utilisation en désinfection d'avions.
- N° Homologation OTAN: 6840-33-2079565 (présentation 50ml) et 6840-33-2079566 (présentation 300ml)
- Dispositif Médical de classe IIa.

Applications

Blocs opératoires, locaux accueillants des patients infectés, ambulances, moyens de transports collectifs (avions, trains, autocars, automobiles...), laboratoires, silos, crèches, hôtels, cabinets médicaux et vétérinaires, salles blanches, conduits d'air conditionné, industrie agroalimentaire, salles à froid, bâtiments d'élevage, etc.

NDP Air Total+ Green CE	Marquage CE ON 0476	Version 07 Date de la dernière mise à jour:30.01.18 PAGE 2 DE 4
------------------------------------	------------------------	--

Composition

Ingrédients	Concentration
Chlorure de didecyl dimethyl ammonium 70%	0,46%
2-Phénoxyethanol	0.10%
Cinnamaldehyde	0.02%
Solvant aliphatique, excipients et propulseur, csp.	100%

Propriétés physiques/chimiques

État à T^{re} ambiante	Liquide (actifs) – Gaz (propulseur)
Pression	20 °C: 5.0 bar 50°C : 10.0 bar
Inflammabilité	Non inflammable
pH	6.5 – 8.5
Masse (bouteille 50ml)	Produit : 11.0 g, Propulseur : 43.7 g Total : 54.7 g
Masse (bouteille 300ml)	Produit : 64.8 g, Propulseur : 263.6 g Total : 328.4 g
Interaction avec d'autres matériaux	Le produit n'est pas corrosif et n'altère pas les matériaux testés : acier AISI 316, aluminium, polymères (PMMA – polyméthacrylate).
Interaction avec l'environnement	Il n'est pas nuisible à la couche d'ozone du fait de l'absence de CFC dans sa formulation.
La sédimentation du produit ne tache pas les surfaces	

Activité anti-microbienne

	Temps (min)	Réduction
BACTERICIDE (UNE-EN 1276)		
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>)	1 min	>5log ₁₀
<i>Streptococcus equi subsp. equi</i>	5 min	>5log ₁₀
BACTERICIDE (UNE-EN 13697)*		
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>)	5 min	>4log ₁₀

NDP Air Total+ Green CE	Marquage CE ON 0476	Version 07 Date de la dernière mise à jour:30.01.18 PAGE 3 DE 4
------------------------------------	------------------------	--

BACTERICIDE (EN 13727)		
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	5 min	>5log ₁₀
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	30 min	>5log ₁₀
FONGICIDE (UNE-EN 1650)		
<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>4log ₁₀
FONGICIDE (UNE-EN 13697)*		
<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>3log ₁₀
FONGICIDE (EN 13624)		
<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	30 min	>4log ₁₀
VIRUCIDE (EN 14476)		
<i>Influenza A (H1N1)*</i> * Virus grippal de nature lipophile (Grippe , Coronavirus , Ebola , Hepatites , HIV...)	15 min	>4log ₁₀
MYCOBACTERICIDE (EN 14348)		
<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>	10 min	>4log ₁₀

* Test réalisé avec la formulation du produit sans alcool

Mode d'emploi

1. Positionner l'emballage sur une surface lisse, et retirer le scellé.
2. Faire pression et tourner la valve de décharge totale. Il se forme un nuage de produit qui couvre un volume de 40 m³ en 1 minute aproximativement pour un format de 50 ml, et de 150 m³ en 3 minutes pour le format de 300 ml.
3. Une fois l'environnement imprégné, laisser agir.
4. Le temps de sécurité est de 1 heure, ou le temps indiqué par la procédure en place .
Aérer la pièce avant de la réintégrer en créant si possible un courant d'air.

Précautions d'usage

- Lire attentivement les instructions avant l'utilisation du produit. Une utilisation inadéquate du produit peut provoquer une désinfection non optimum des surfaces.
- Maintenir à des températures supérieures à 0°C. Eviter la congélation
- Récipient sous pression. À protéger des rayons du soleil et ne pas soumettre à des températures supérieures à 50°C. Ne pas perforer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Maintenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.
- Ne pas utiliser avec des produits qui contiennent du chlore (hypochlorites) ni avec des détergents à base de tensioactifs cationiques.

NDP Air Total+ Green CE	Marquage CE ON 0476	Version 07 Date de la dernière mise à jour:30.01.18 PAGE 4 DE 4
------------------------------------	------------------------	--

- Mentions de danger : Provoque une sévère irritation des yeux (H319), Peut provoquer somnolence ou vertiges (H336), Nocif pour la vie aquatique avec des effets néfastes à long terme (H412)
- Conseils de prudence: Éviter de respirer les aérosols (P261), Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Se laver les mains soigneusement après manipulation (P280 + P264), EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. (P305 + P351 + P338). Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. (P337 + P313). Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche (P403 + P233), Éviter le rejet dans l'environnement (P273), Éliminer le contenu et/ou le récipient en accord avec les règlements de résidus dangereux (P501).

Présentations

Emballage aérosol de 300 ml : Référence AT+C300IFE

Emballage aérosol de 50 ml : Référence AT+C50IFE (cartons de 50 unités) et AT+C50DIFE (cartons de 12 unités)